

Silk'n®

Beautiful Technology

Tightra


H2401

הוראות שימוש

HB



Silk'n Tightra

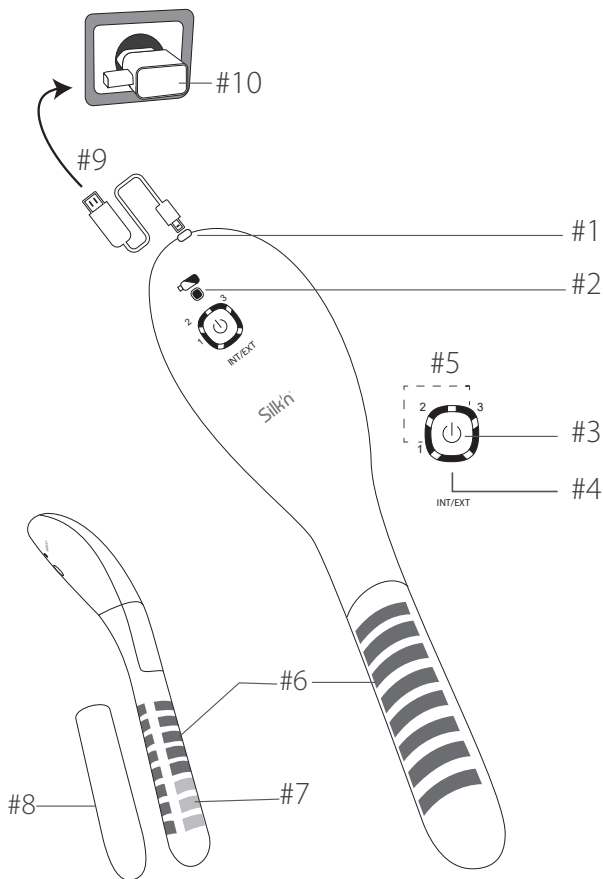

תוכן העניינים

2	אזהרות	.1
4	התוויות נגד	.2
7	אמצעי בטיחות	.3
7	הכירי את המכשיר	.4
7	תיאור המכשיר	4.1
8	למה מיועד המכשיר?	4.2
8	תכולת האריזה	4.3
8	חלקי המכשיר	4.4
9	הפעלת המכשיר	4.5
10	כיבוי המכשיר	4.6
11	מצבי טיפול	4.7
11	רמות אנרגיה	4.8
11	טעינת המכשיר	4.9
12	הטיפולים	.5
12	תוכנית טיפולים	5.1
12	למה לצפות מהשימוש במכשיר	5.2
13	תופעות לוואי אפשריות	5.3
15	הטיפול	.6
15	לפני הטיפול	6.1
15	טיפול במצב פנימי	6.2
17	טיפול במצב חיצוני	6.3
18	לאחר הטיפול	6.4
19	ניקיון, תחזוקה ואחסון	.7
19	איתור תקלות	.8
20	שירות לקוחות	.9
20	חומרים מתכלים	.10
21	אחריות	.11
21	מחזור	.12
21	אריזה	12.1
21	הוצאת הסוללה	12.2
22	מכשיר	12.3
22	מפרט טכני	.13
24	סימנים וסמלים	.14
25	תיוג	.15
25	עקומות הספק מוצא	.16
26	תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית	.17
27	זכויות יוצרים	.18



יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני השימוש הראשון, ולשמור אותו לשימוש עתידי. אנו ממליצים לקרוא את ההוראות לפני כל טיפול.

- יש להקפיד לשמור את המכשיר, כבל ה-USB וספק הכוח יבשים בכל עת.
- אין להשתמש במכשיר תוך כדי רחצה או מקלחת.
- יש להקפיד על ידיים יבשות בעת חיבור המכשיר לחשמל.
- אין להשתמש בספק הכוח אם הכבל או התקע פגומים, אם הוא אינו פועל כראוי או כאשר הוא רטוב. במקרה כזה, נתקו מיד את ספק הכוח מהחשמל לפני שתגעו בו. אי ניתוק ספק הכוח מהחשמל עלול לגרום להתחשמלות!
- אין להפעיל את המכשיר במקומות שבהם קיימת סכנת פיצוץ. יש להרחיק את המכשיר ואת כל חלקיו מאש וממשטחים חמים.
- הקפידו שספק הכוח יהיה נגיש בכל עת, כדי שניתן יהיה להוציא אותו מהשקע בקלות במקרה חירום.
- לאחר הטעינה נתקו את המכשיר מהחשמל.

- אין לנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל. יש לאחוז בספק הכוח בזמן שמנתקים אותו מהחשמל.
- ודאו כי הכבל של ספק הכוח מונח באופן שאינו מהווה סכנת מעידה.
- אין להשתמש במכשיר אם החלקים או האביזרים לא סופקו בידי היצרן כפי שהוגדר במדריך זה, או אם המכשיר פגום ואינו פועל כראוי. במקרים אלו יש לפנות למוקד שירות הלקוחות.
- לפני כל שימוש יש לוודא כי אין באזור משטחים קשים, בליטות או קצוות חדים שעלולים לגרום לנזק.
- אין לנסות לבצע שינויים במכשיר, לפתוח אותו או לתקן אותו. אתם עלולים לחשוף את עצמכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לעצמכם נזק חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם האריזה של המכשיר. הם עלולים להיפצע מחומרי האריזה או לבלוע את החלקים הקטנים ולהיחנק.

⊙ יחידה זו תוכננה ונבדקה כך שתעמוד בדרישות של תקנים למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות ואלקטרוסטטיות והפרעות לתדרי רדיו. אף על פי כן, ייתכן שתיגרם הפרעה אלקטרומגנטית או הפרעה אחרת בעת הפעלת המכשיר. הזזת המכשיר למקום אחר עשויה לנטרל את ההפרעה.

⊙ אם המכשיר הגיע לסוף חייו, יש לקחת אותו יחד עם כל חלקיו לנקודת מחזור המיועדת למכשירים חשמליים. למידע נוסף עיינו בסעיף 12. מחזור.

2. התוויות נגד

מכשיר זה, על כל חלקיו, מתאים לנשים מגיל 18 ומעלה המעוניינות לחזק ולהדק את רצפת האגן, להפחית דליפת שתן במאמץ או להקל על תסמינים נרתיקיים.

המכשיר לא נועד לשימוש בילדות, בנשים טרנסג'נדריות, במבוגרות שיש להן מוגבלות פיזית או מנטלית, או במי שחסרות ניסיון או ידע בהפעלת המכשיר באופן בטיחותי, או במי שאינן מבינות את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.

⚠ אין להשתמש במכשיר אם:

⊙ אם את בהריון או מניקה.

⊙ אם עברת כל סוג של פרוצדורה ניתוחית בנרתיק או באזור האגן ב-12 החודשים האחרונים, או כל עוד המקום לא החלים לגמרי.

⊙ אם יש לך קוצב לב או דפיברילטור פנימי, או כל שתל או מתקן חשמלי אחר במקום כלשהו בגוף.

⊙ אם יש לך שתל מתכתי באזור הטיפול, כולל התקן תוך רחמי מתכתי.

- אם יש לך כמה מחלות חמורות במקביל, כגון מחלות לב, הפרעות חושיות, אפילפסיה, יתר לחץ דם שאינו מאוזן, מחלות כבד או כליה.
- אם היה לך בעבר סרטן עור או סרטן באזור אברי המין, אם יש לך כעת סרטן מכל סוג שהוא או אם יש לך שומות טרום-סרטניות.
- אם המערכת החיסונית שלך מוחלשת עקב מחלה כגון עומס נגיפי של HIV, או עקב שימוש בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית.
- אם יש לך מחלה בלתי מאוזנת של המערכת האנדוקרינית כגון סוכרת, ליקוי בתפקוד בלוטת התריס או וירליזציה הורמונלית.
- אם יש לך בעיה פעילה כלשהי באזור הטיפול כגון פצעים, פסוריאזיס, אקזמה, פריחה, חתכים פתוחים, שפשופים או חבורות.
- אם עברת טיפול באמצעות אור, לייזר, גלי רדיו או כל מכשיר אחר באזור הטיפול או במקרה של פרוצדורות ללא צריבה, או במקרה של פילינג באמצעות לייזר עם צריבה (בהתאם לחומרת הטיפול) תוך 3 חודשים לפני הטיפול.
- אם השתמשת באיזוטרטינואין (רואקוטן) ב-6 החודשים שקדמו לטיפול.
- אם יש לך מחלה המועברת ביחסי מין.
- אם יש לך דלקת בדרכי השתן או באזור האגן.
- אם עברת טיפולי הקרנות או כימותרפיה בשלושת החודשים האחרונים.
- אם יש לך מחלה או בעיה בריאותית אשר מפחיתה את הרגישות שלך לחום.
- בזמן הווסת.
- אם יש לך בעיה בריאותית אחרת, אשר לדעת הרופא שלך הופכת את השימוש במכשיר ללא בטיחותי עבורך.



יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר במקרים הבאים:

- אם קיבלת תוצאה חריגה בבדיקת משטח צוואר הרחם (פאפ) או בבדיקה של האגן בשנתיים האחרונות.
- אם יש לך היסטוריה של מחלות המתפרצות עקב חום, כגון הרפס סימפלקס חוזר, באזור הטיפול.
- אם עברת ניתוח בנרתיק, או אם נאמר לך שאת סובלת מצניחה של הנרתיק.
- אם יש לך היסטוריה של מחלות עור, הצטלקות יתר (צלקת קלואידינית), ריפוי לא תקין של פצעים, או עור מאוד יבש ועדין.
- אם יש לך היסטוריה של ליקוי בקרישת הדם או אם את משתמשת בתרופות מונעות קרישה, מלבד אספירין במינון נמוך.
- אם יש לך שתל של רשת.
- אם יש לך התקן תוך רחמי שאינו מתכתי.
- אם השתמשת בשבועיים האחרונים בתרופות, צמחים, תוספי מזון או ויטמינים שיכולים להשפיע על תהליך הריפוי באזור הטיפול.
- אם את סובלת מצניחה של הרחם, שלפוחית השתן או החלחולת והמעי הגס.
- אם קיבלת מהרופא שלך תרופות לטיפול במחלת עור כלשהי בששת החודשים האחרונים.
- אם את סובלת משרירנים ברחם (מיומות), פוליפים ברחם או ברירית הרחם, או כל בעיה אחרת ברחם או בצוואר הרחם.

3. אמצעי בטיחות

עם ה־Silk, הבטיחות קודמת לכל. המכשיר כולל את אמצעי הבטיחות הבאים:

- **מייצב חום:** על מנת למנוע חימום יתר, כל אחת מ-16 האלקטרודות (#6), (#7) מכילה מייצב חום מובנה. כאשר המכשיר מזהה עלייה בטמפרטורת העור המטופל, המייצב מפסיק באופן אוטומטי את פליטת אנרגיית ה-RF עד שטמפרטורת העור יורדת מספיק כדי לאפשר למייצב לחדש את החימום.
- **חיישן מגע:** חיישן המגע מוודא שאנרגיית ה-RF עוברת דרך האלקטרודות (#6), (#7) רק כאשר האלקטרודות (#6)(#7) נמצאות במגע עם העור.
- **חיישן תנועה:** בשימוש במכשיר במצב חיצוני, המכשיר פולט אנרגיית ה-RF רק כאשר הוא מונע על פני העור.

4. הכירי את המכשיר

4.1 תיאור המכשיר

המכשיר פועל באמצעות אנרגיית RF דו-קוטבית הזורמת בין האלקטרודות (#6), (#7). אנרגיית ה-RF הדו-קוטבית פועלת ליצירה ושיקום של קולגן וסיבים אלסטיים בנרתיק.

המכשיר כולל נורות LED המציינות את רמות האנרגיה ואת מצבי הטיפול השונים. המכשיר כולל סוללה שניתן לטעון באמצעות כבל USB TYPE C (#9).

עיינו באיור בעמוד (i) כדי לאתר את המיקום של כל אחד מהחלקים.

4.2 למה מיועד המכשיר?

מכשיר חשמלי זה נועד לחזק ולהדק את רצפת האגן, להפחית דליפת שתן במאמץ, להקל על תסמינים נרתיקיים ולשפר את התפקוד המיני.

המכשיר נועד לשימוש עצמי בלבד, ואינו מתאים לשימוש מסחרי או טיפולי. אין להשתמש במכשיר לשום מטרה מלבד זו שמתוארת במדריך זה.

4.3 תכולת האריזה


- המכשיר
- כבל ומתאם USB
- ג'ל אינטימי של Silk'n
- מדריך למשתמש
- תעודת אחריות
- תיק אחסון


4.4 חלקי המכשיר


- יציאת USB (#1)
- נורית חיווי מצב הסוללה (#2)
- כפתור הפעלה (#3)
- נורית החיווי של מצב הטיפול (#4)
- נוריות החיווי של רמת האנרגיה (#5)
- אלקטרודות מצב פנימי (#6)
- אלקטרודות מצב חיצוני (#7)
- כיסוי מגן (#8)
- כבל USB - סוג C (#9)
- מתאם USB (#10)

4.5 הפעלת המכשיר

תיאור	פעולה	כפתור הפעלה
המכשיר מופעל - מצב פנימי, רמת אנרגיה 1 (נמוכה); נורית החיווי של מצב הטיפול (#4) כבויה (ללא אור) ברגע שהמכשיר פועל, ניתן לכבותו באמצעות לחיצה ארוכה; בעת הכיבוי יורגש רטט אחד.	לחיצה ארוכה	כפתור הפעלה (#3) 
מצב פנימי - רמת אנרגיה 2 (בינונית)	לחיצה קצרה אחת	
מצב פנימי - רמת אנרגיה 3 (גבוהה).	לחיצה קצרה (פעמיים)	
מצב חיצוני - רמת אנרגיה 1 (נמוכה); נורית החיווי של מצב הטיפול (#4) דולקת (אור לבן קבוע)	לחיצה קצרה (3 פעמים)	
מצב חיצוני - רמת אנרגיה 2 (בינונית)	לחיצה קצרה (4 פעמים)	
מצב חיצוני - רמת אנרגיה 3 (גבוהה)	לחיצה קצרה (5 פעמים)	

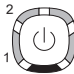מצב פנימי	כבויה: ללא אור	נורית החיווי של מצב הטיפול (#4)
מצב חיצוני	דלוקה: אור לבן קבוע	
שגיאה במערכת. נורית החיווי של מצב הטיפול ונורית החיווי של רמת האנרגיה מהבהבות לסירוגין (#5)	דלוקה: אור לבן מהבהב	

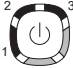כפתור הפעלה	פעולה	תיאור
נוריות החיווי של רמת האנרגיה (#5) 	אור ירוק (דולקת באופן קבוע)	נורית אחת - רמה 1 (נמוכה) 2 נוריות - רמה 2 (בינונית) 3 נוריות - רמה 3 (גבוהה)
	אור ירוק (מהבהבת)	שגיאה במערכת. נורית החיווי של רמת האנרגיה ונורית החיווי של מצב הטיפול מהבהבות לסירוגין (#4)

כפתור הפעלה	פעולה	תיאור
נורית חיווי מצב הסוללה (#2) 	אור ירוק (מהבהבת) אור ירוק (דולקת באופן קבוע) אור כתום (מהבהבת) אור כתום (דולקת באופן קבוע)	טעינת המכשיר המכשיר טעון במלואו הסוללה חלשה הסוללה התרוקנה, מצב הטיפול אינו פעיל

4.6 כיבוי המכשיר

המכשיר כבה באחד משלושה מצבים:

● השלמת טיפול של 20 דקות.

● המכשיר לא נוגע בעור במשך יותר משתי דקות.

● הסוללה חלשה מדי.

i בעת כיבוי המכשיר יורגש רטט אחד.

4.7 מצבי טיפול


למכשיר שני מצבי הטיפול: פנימי וחיצוני.

- **מצב פנימי:** השתמשי במצב זה כדי להדק את רקמת הנרתיק ואת שרירי רצפת האגן, על מנת להגביר את טונוס השרירים ולהפחית דליפת שתן.
- **מצב חיצוני:** השתמשי במצב זה כדי להדק את רקמת העור החיצונית של הדגדגן, לשיפור המראה החיצוני של הנרתיק.
- **החלפת מצב הטיפול:** כבי את המכשיר והדליקי אותו שוב. כדי לקבוע את מצב הטיפול הרצוי, ראי שלב 2 תחת הסעיפים 6.2 טיפול במצב פנימי או 6.3 טיפול במצב חיצוני).

4.8 רמות אנרגיה

- לכל מצב טיפול יש 3 רמות אנרגיה: רמה 1 (נמוכה), רמה 2 (בינונית), ורמה 3 (גבוהה). באופן כללי, ככל שתשתמשי ברמת אנרגיה גבוהה יותר, כך תוצאות הטיפול יהיו טובות יותר.
- כל מצב טיפול מתחיל ברמת אנרגיה 1.
- **שינוי רמת האנרגיה:** עברי בין רמות האנרגיה השונות באמצעות לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה (#3) עד שתגיעי לרמה הרצויה.

4.9 טעינת המכשיר

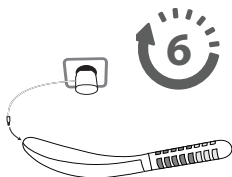

- יש להטעין את המכשיר לפני השימוש הראשון. הטעינה הראשונית אורכת כ-6 שעות.
- חברי את כבל ה-USB (#9) למכשיר. חברי את הקצה השני של הכבל למתאם ה-USB (#10) וחברי את המתאם לחשמל. נוריות החיווי של מצב הסוללה ושל מצב הטיפול (#4), (#2) ידלקו וייכבו, ולאחר מכן נורית החיווי של הסוללה (#2) תהבהב באור ירוק.

יש להטעין את המכשיר במלואו לאחר כל טיפול של 20 דקות, ולבדוק את מצב הסוללה לפני התחלת טיפול חדש.

5. הטיפולים

5.1 תוכנית טיפולים



- כל טיפול פנימי או חיצוני נמשך 20 דקות.
- השתמשי במכשיר באחד המצבים או בשניהם 2-3 פעמים בשבוע, למשך 4 שבועות.
- לאחר מכן הפחיתי את תדירות השימוש בהדרגה לפעם בשבוע, ובהמשך לפעם בשבועיים או פחות, בהתאם לצרכיך.

5.2 למה לצפות מהשימוש במכשיר

בזמן הטיפול ייתכן שתתקלו בתופעות הבאות, שהינן חלק מהפעולה הרגילה של המכשיר:

- **תחושת חום:** יכולה להופיע בזמן טיפול פנימי או חיצוני.
- **אדמומיות או נפיחות קלה בעור:** תופעה זו יכולה להתרחש באזור הנרתיק לאחר טיפול חיצוני. היא אמורה להימשך לא יותר מ-24 שעות.
- **i** אם את סובלת מאדמומיות או נפיחות, מומלץ למרוח ג'ל אלורה על העור הפגוע.
- **רטט קצר:** במהלך הטיפול כל כמה דקות תרגישו תחושת רטט. זהו חלק מהפעולה הנורמלית של המכשיר, מעידה על כך שהוא פעיל.



החמרה זמנית באי-שליטה על הסוגרים: כאשר משתמשים במכשיר במצב פנימי, חלק מהמשתמשות מרגישות כי הן צריכות להשתין לעתים קרובות יותר. אל דאגה, תופעה זו תיעלם תוך כמה ימים. בעקבות הטיפולים יחול שיפור והתסמינים של חוסר שליטה על הסוגרים יפחתו.



הפסיקי מיד את השימוש במכשיר אם מתפתחת אדמומיות של ממש בעור, או אם מופיעות שלפוחיות או כוויות.




הפסיקי מיד את השימוש אם את סובלת מכאב, או אם העור או המכשיר מתחמם יתר על המידה.

5.3 תופעות לוואי אפשריות

כל עוד תשתמשו במכשיר בהתאם להוראות, הסבירות שתסבלו מתופעות לוואי וסיבוכים עקב השימוש במכשיר אינה גבוהה. להלן כמה המלצות שיכולות לסייע במקרה שתסבלי מאחת מתופעות הלוואי האפשריות.

<p>המלצה: השתמשי ברמת אנרגיה נמוכה יותר והמתיני עד שחוסר הנוחות יחלוף לפני ביצוע הטיפול הבא.</p>	<p>חוסר נוחות קל (מצב פנימי/חיצוני)</p> <p>חלק מהמשתמשות עלולות לחוש אי-נוחות קלה במהלך הטיפול. ניתן לתאר זאת באופן הטוב ביותר כתחושת צריבה בעור שמסביב לנרתיק. תחושת הצריבה עשויה להימשך לאורך הטיפול או אף אחריו.</p>
<p>המלצה: השתמשי ברמת אנרגיה נמוכה יותר וחכי עד שהתחושות הללו יחלפו לפני ביצוע הטיפול הבא.</p>	<p>תחושת חום מוגזמת (מצב פנימי/חיצוני)</p> <p>אם את חשה בכאב, חוסר נוחות או תחושה מאוד לא נעימה, הפחיתי את רמת האנרגיה עד שהרגשתך תשתפר.</p>
<p>המלצה: הפסיקי את הטיפול, והיועצי ברופא אם התגובה נמשכת יותר מ-24 שעות.</p>	<p>תגובה אלרגית (מצב פנימי / חיצוני)</p> <p>במקרים נדירים, תיתכן תגובה אלרגית לאחר הטיפול.</p>

<p>המלצה: טפלי באזור באמצעות מריחת קרם אלווורה לעתים קרובות. חכי עד שהתופעה תחלוף לפני ביצוע הטיפול הבא. היוועצי עם רופא אם האדמומיות לא חולפת תוך 5 ימים.</p>	<p>אדמומיות ונפיחות מוגזמות (מצב חיצוני) במקרים נדירים, העור מסביב לנרתיק עלול להפוך לאדום ונפוח מאוד. האדמומיות והנפיחות אמורות לפוג תוך יומיים עד חמישה ימים.</p>
<p>המלצה: קררי את אזור הטיפול ומרחי קרם נגד כוויות. חכי עד שהתופעה תחלוף לפני ביצוע הטיפול הבא, והשתמשי ברמת אנרגיה נמוכה יותר. אם העור לא חוזר למצבו הרגיל בתוך שבוע, יש לפנות לרופא.</p>	<p>שלפוחיות או כוויות (מצב חיצוני) במקרים נדירים מאוד, ייתכן שיופיעו שלפוחיות או כוויות בעור שמסביב לנרתיק.</p>
<p>המלצה: היוועצי ברופא אם התופעה נמשכת יותר מ-24 שעות.</p>	<p>דימום קל (מצב פנימי) במקרים נדירים, ייתכן דימום קל מהנרתיק מיד לאחר הטיפול.</p>

יש להפסיק את השימוש במכשיר באופן מידי אם ישנה החמרה באחת מתופעות הלוואי. 

פנו לרופא אם התופעות לא חולפות תוך יומיים-שלושה. 

6.1 לפני הטיפול

- ודאי שהסוללה אינה חלשה (ראי סעיף 4.9 טעינת המכשיר).
- לפני הטיפול יש לרוקן את שלפוחית השתן.
- ודאי שתוקף הג'ל לא פג.
- לפני השימוש במכשיר הסירי את הכיסוי המגן (**#8**) שמכסה את האלקטרודות (**#6**), (**#7**).
- לפני השימוש יש לנקות את האלקטרודות (**#6**), (**#7**) עם מגבון המיועד לניקוי הנרתיק, ולייבש אותן באמצעות מגבת נייר נקייה.
- לפני השימוש במכשיר, אין לנקות את העור באמצעות נוזלים דליקים כגון אצטון או אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או תכשירים אחרים המכילים אלכוהול).
- יש להסיר פירסינג וכל סוג אחר של מתכת מאזור הטיפול לפני השימוש.

6.2 טיפול במצב פנימי

1. מרחי כמות קטנה של הג'ל שמגיע עם המכשיר על כל האלקטרודות (**#6**), (**#7**). אין צורך למרוח את הג'ל בתוך הגוף.
2. כדי לבצע טיפול במצב פנימי, הדליקי את המכשיר באמצעות לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (**#3**). המצב הפנימי יהיה פעיל, ורמת האנרגיה תוגדר לרמה 1. נורית החיווי של מצב הטיפול (**#4**) תהיה כבויה (ללא אור). המכשיר ירטוט פעם אחת, ולאחר מכן יהיה מוכן לשימוש.
3. שכבי כך שתרגישי בנוח. התחילי את הטיפול ברמת אנרגיה 1.

4. הכניסי את החלק שעליו נמצאות האלקטרודות (**#6**), (**#7**) לתוך הנרתיק עד לעומק שנוח לך. בזמן שהמכשיר נמצא בתוך הנרתיק, יש לוודא כי הוא נתמך לאורך כל הטיפול:

- אם את שוכבת על המיטה עם רגליים מפושקות, סגרי מעט את הרגליים כדי להחזיק את המכשיר במקומו.
- אם את שוכבת עם רגליים מכופפות (כשכפות רגלייך על המיטה), הניחי כרית מתחת למכשיר כדי להחזיקו במקומו.
- ניתן להחזיק את המכשיר ביד אם זה עוזר לך לוודא שהוא נשאר במקומו.

i בזמן הטיפול תרגישי רטט בערך אחת לדקה.

5. אם אחרי 5 דקות את מרגישה שרמת החום נוחה לך, עברי לרמת האנרגיה 2 באמצעות לחיצה קצרה על כפתור הפעלה (**#3**). כדי לעבור לרמת האנרגיה 3 (הגבוהה), לחצי עוד לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה (**#3**).

6. השאירי את המכשיר במקומו למשך 20 דקות. מומלץ לשכב בלי לזוז בעת הטיפול. עם זאת, כדאי לסובב את המכשיר מדי פעם כדי לוודא שהאנרגיה ממשיכה לזרום דרך האלקטרודות (**#6**)(**#7**). אחרי 20 דקות המכשיר ייכבה.

i במקרה של כאב או חוסר נוחות:

- אם את משתמשת ברמת אנרגיה 2 או 3, הפחיתי את רמת האנרגיה באמצעות לחיצה אחת או שתיים על כפתור ההפעלה (**#3**). חכי 5 דקות עד שעוצמת החום תפחת.
- אם את כבר משתמשת ברמת האנרגיה 1, הוציאי את המכשיר וחכי עד שהרגשתך תשתפר לפני שתחזרי להשתמש בו.


7. בסיום הטיפול הוציאי את המכשיר ונגבי את העור החיצוני שמסביב לנרתיק עם מטלית יבשה ונקייה או עם מגבונים שמיועדים לאזור הנרתיק, כדי להסיר את שאריות הג'ל.

8. נקי את המכשיר (ראי סעיף 7. ניקיון, תחזוקה ואחסון).

6.3 טיפול במצב חיצוני

לפני השימוש על העור להיות מגולח, נקי, יבש וללא אבקות, תכשירים נגד הזעה או דאודורנטים. בנוסף, ודאי שהעור אינו אדום או מודלק.

1. מרחי כמות קטנה של הג'ל שמגיע עם המכשיר על שלוש האלקטרודות הכסופות **(#6)****(#7)**. אין צורך למרוח את הג'ל בתוך הגוף.
2. כדי לבצע טיפול במצב חיצוני, הדליקי את המכשיר באמצעות לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה **(#3)**, ולאחר מכן לחצי עליו 3 לחיצות קצרות. המצב החיצוני יהיה פעיל, ורמת האנרגיה תוגדר לרמה 1. נורית החיווי של מצב הטיפול **(#4)** תידלק באור לבן. המכשיר ירטוט פעם אחת, ולאחר מכן יהיה מוכן לשימוש.
3. שכבי כך שתרגישי בנוח. התחילי את הטיפול ברמת אנרגיה 1.
4. החזיקי את בסיס המכשיר והניחי את שלוש האלקטרודות הכסופות **(#7)**, **(#6)** על שפתי הפות. צורתן המשולשת של הצד שעליו ממוקמות האלקטרודות **(#6)** הכסופות **(#7)** תעזור לך למקום את המכשיר כראוי.

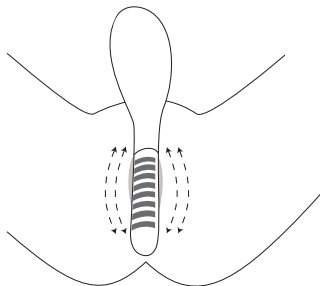

5. כאשר האלקטרודות **(#6)**, **(#7)** נוגעות בעור, ולאחר שתתחילי להניע את המכשיר, תרגישי שנפלט חום מהאלקטרודות **(#6)**, **(#7)**. המשיכי להניע את המכשיר על פני העור לאט אך בחוזקה. אם לא תהיה תנועה, אנרגיית ה-RF הדו-קוטבית לא תפעל.

i בזמן הטיפול תרגישי רטט בערך אחת לדקה.

6. אם אחרי 5 דקות את מרגישה שרמת החום נוחה לך, עברי לרמת האנרגיה 2 באמצעות לחיצה קצרה על כפתור הפעלה (#3). כדי לעבור לרמת האנרגיה 3 (הגבוהה), לחצי עוד לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה (#3).

i אם רמת האנרגיה מתאימה לך, אך את מרגישה מדי פעם שהחום גבוה מדי, הרחיבי את אזור הטיפול ו/או המשיכי להניע את המכשיר על פני אזור הטיפול.

i אם את מתקשה להניע את המכשיר על העור, ניתן למרוח עוד כמות קטנה של ג'ל על שלוש האלקטרודות הכסופות (#6)(#7).

7. המשיכי להחליק את המכשיר על פני שפתי הפות. אחרי 20 דקות המכשיר ייכבה.

i במקרה של כאב או חוסר נוחות: הרחיקי את המכשיר וחכי עד שהרגשתך תשתפר לפני שתחזרי להשתמש בו.

8. בסיום הטיפול הוציאי את המכשיר ונגבי את העור החיצוני שמסביב לנרתיק עם מטלית יבשה ונקייה או עם מגבונים שמיועדים לאזור הנרתיק, כדי להסיר את שאריות הג'ל.

9. נקי את המכשיר (ראי סעיף 7.7 ניקיון, תחזוקה ואחסון).

6.4 לאחר הטיפול

אחרי כל טיפול פנימי או חיצוני עם המכשיר מומלץ לפעול על פי ההוראות הבאות:

- יש להימנע משימוש במים חמים מאוד במשך יומיים לאחר הטיפול.
- יש לפנות לרופא אם מופיע סימן כלשהו לזיהום, נפיחות מוגזמת, אדמומיות, כאב, או כל תסמין יוצא דופן אחר.

7. ניקיון, תחזוקה ואחסון

● השתמשי במגבונים המיועדים לנרתיק כדי להסיר שאריות של ג'ל מהמכשיר, כולל שטח הטיפול. הדבר ימנע מהג'ל להתקשות או להזיק למכשיר.

● לאחר מכן יבשי את המכשיר עם מגבת נייר נקייה.

● לאחר הניקיון, מומלץ לאחסן את המכשיר בתיק כלי הרחצה. ניתן לכסות את האלקטרודות (**#6**), (**#7**) באמצעות כיסוי המגן (**#8**), אך זה לא הכרחי.

i ניתן להשתמש בחומרי ניקוי המכילים עד 70% אלכוהול, אך לעולם אין להשתמש באצטון או בחומרי ניקוי חריפים אחרים, משום שהם יגרמו נזק למכשיר.

⚠ אין לטבול את המכשיר או כל אחד מחלקיו במים.

8. איתור תקלות

אין לנסות לבצע שינויים במכשיר, לפתוח אותו או לתקן אותו. אתם עלולים לחשוף את עצמכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לעצמכם נזק חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות.

בעיה	הסבר / מה לעשות
המכשיר לא נדלק.	בדקי שהמכשיר טעון. אתחלי את המכשיר.
המכשיר לא פולט חום.	המכשיר לא יפלוט חום אם האלקטרודות (#6), (#7) לא נוגעות בעורך. זהו אמצעי בטיחות. ודאי כי המכשיר לחוץ בחוזקה על העור לפני התחלת הטיפול. המכשיר לא יפלוט חום אם לא מרחת ג'ל, או אם הג'ל שמרחת התייבש. הקפידי למרוח את הג'ל מיד לפני הטיפול.

הסבר / מה לעשות	בעיה
שגיאה במערכת. אתחלי את המכשיר.	נורית החיווי של מצב הטיפול (#4) ונוריות החיווי של רמת האנרגיה (#5) מהבהבות לסירוגין.
ודאי כי ספק הכוח מחובר למכשיר ולחשמל. נתקי את המתאם (#10) וחברי אותו מחדש כדי לאפס את המכשיר. בדקי שכבל ה-USB (#9) אינו פגום.	המכשיר לא נטען.
ודאי כי המכשיר טעון במלואו. המכשיר ייכבה באופן אוטומטי בזמן טיפול אם הסוללה חלשה מדי או אם אירעה שגיאת מערכת.	המכשיר הפסיק לעבוד באמצע טיפול.
	המכשיר הפסיק לעבוד. אתחלי את המכשיר.

אם הבעיות נמשכות, פני למוקד שירות הלקוחות.

9. שירות לקוחות

למידע נוסף בקרו באתר שלנו www.silkn.co.il. במקרה של בעיה עם המכשיר, אנא פנו למוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל: contact@silkn.co.il, או בטלפון 1-700-700-309.

10. חומרים מתכלים

ניתן לרכוש את הג'ל האינטימי של Silk'n באתר שלנו: www.silkn.co.il.

11. אחריות

למידע המלא יש לעיין בחוברת האחריות שסופקה בנפרד.

i היצרן אינו אחראי לנזק או לפציעות שייגרמו עקב שימוש בלתי הולם או שימוש לא נכון במכשיר.

12. מחזור

אל תשליכו את המכשיר לפח האשפה. אנא פעלו בהתאם לחוקי המחזור של מכשירים חשמליים החלים באיזור מגורכם.


12.1 אריזה

מחזרו את חלקי האריזה בנפרד בהתאם לסוג החומר. את הקרטון יש להשליך למיכל למחזור נייר, ואת אריזות הפלסטיק יש למחזר באמצעות שירות איסוף חומרים למחזור.


12.2 הוצאת הסוללה

כשהמוצר מגיע לסוף חייו, חובה להוציא את הסוללה לפני השלכתו. על מנת לעשות זאת יש לפתוח את המכשיר. לאחר הפירוק, המכשיר לא יפעל ולא ניתן יהיה לתקנו. פתיחת מעטפת המכשיר והוצאת הסוללה יבטלו את האחריות על המכשיר. הום סקינוביישנס אינה אחראית לכל נזק גופני או חומרי שייגרם עקב ביצוע הליך זה.

- 1. ניתוק המכשיר מהחשמל:** הוציאי את המכשיר מהחשמל, הוציאי את קבל ה-USB (#9) ודאי שהסוללה ריקה.
- 2. פתיחת מעטפת המכשיר:** כדי לפתוח את מעטפת המכשיר ניתן להשתמש בכלי קטן, (מברג או סכין למשל).

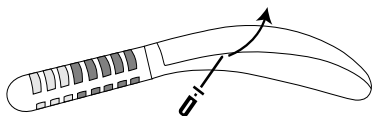

3. **הוציאו את הסוללה:** הניח את המכשיר על שולחן יציב. החזיקי את המעגל המודפס (הלוח הירוק) ביד אחת, והוציאי בזהירות את הסוללה עם היד השנייה. אין לגרום נזק לסוללה.

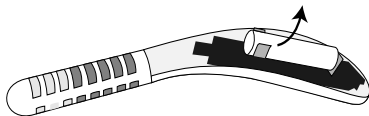

12.3 מכשיר

אין להשליך לפח עם פסולת ביתית! על פי תקנות מחזור מוצרי חשמל (WEEE), יש למחזר מכשיר חשמלי זה (כולל כל האביזרים והחלקים) בנקודת איסוף ייעודית למחזור מכשירי חשמל. רק כך ניתן לוודא כי המכשיר יעבור מחזור באופן מקצועי, ולמנוע שחרור חומרים מזיקים* לסביבה. לפני מחזור המכשיר, ודאו כי לא השארתם אותו במצב טעון.

* סימני החומרים המזיקים במוצר: Cd = קדמיום, Hg = כספית, Pb = עופרת.

13. מפרט טכני


H2401	דגם
RT™	טכנולוגיה
10W מקסימום; 1 MHz ±30%	RF דו-קוטבי (תדר; הספק מוצא מרבי, זרם מוצא מרבי)
חיישן טמפרטורה למניעת חימום יתר של העור חיישן מגע וחיישן תנועה	הפעלה ובטיחות
טמפרטורה: 40° עד +70°C אחוזי לחות: rH 90% מקסימום לחץ אטמוספרי: 1060 - 500 hPa	תנאים סביבתיים בעת הובלה ואחסון של המכשיר בין טיפולים
טמפרטורה: 40°C - 5°C לחות יחסית: rH של 15% עד 90% לחץ אטמוספרי: 1060 - 700 hPa	תנאים סביבתיים בעת הפעלת המכשיר

30 דקות	הזמן הנדרש למכשיר להגיע מטמפרטורת האחסון המינימלית לטמפרטורת ההפעלה המינימלית, כאשר טמפרטורת הסביבה היא 20°C
30 דקות	הזמן הנדרש למכשיר להגיע מטמפרטורת האחסון המקסימלית לטמפרטורת ההפעלה המקסימלית כאשר טמפרטורת הסביבה היא 20°C
רמה 2 - מצב טעינה ציוד רפואי עם אספקת חשמל פנימית - מצב טיפול חלק מיושם מסוג BF.	הגנה מפני התחשמלות
IP23	הגנה מפני חדירה מזיקה של מים או חלקיקים
רציף	אופן פעולה
KSA-10D-050200HE	ספק כוח
100-240V; 50/60Hz; 0.3A; 5.0V - 2.0A	כניסה; יציאה של המתאם
5 שנים	אורך החיים הצפוי של המכשיר

14. סימנים וסמלים


הצהרה או אירוע המעיד על סכנה בזמן השימוש במכשיר.	
מידע חשוב בנוגע לשימוש או תחזוקה של המכשיר.	
המכשיר מוגן מפני התזת מים כאשר הוא נוטה בזווית של עד 60 מעלות.	IP23
רמת הגנה מפני התחשמלות: חלק מיושם מדירוג BF.	
ייתכן שתיגרם הפרעה בסביבת הציווד.	
אין להשליך לפח עם פסולת ביתית! על פי תקנות מחזור מוצרי חשמל (WEEE), יש למחזר מכשיר חשמלי זה (כולל כל האביזרים והחלקים) בנקודת איסוף ייעודית למחזור מכשירי חשמל.	 
מלאו אחר הוראות ההפעלה.	
מכיל סוללת ליתיום.	
תאריך ייצור.	
יצרן.	
המספר הסידורי של המוצר.	

i מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בקרבת תערובת דליקה של חומר הרדמה יחד עם אוויר, חמצן או חמצן דו-חנקני.

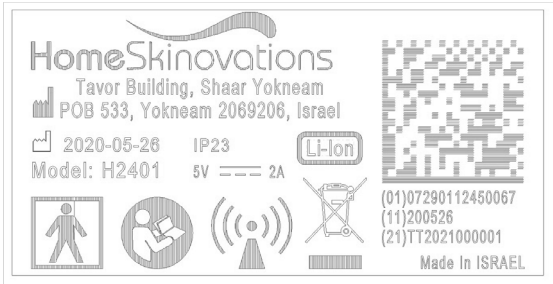

16. עקומות הספק מוצא

העקומה מתארת את השינויים המתרחשים בכל אחד מהמצבים תחת הגדרות הספק מסוימות.

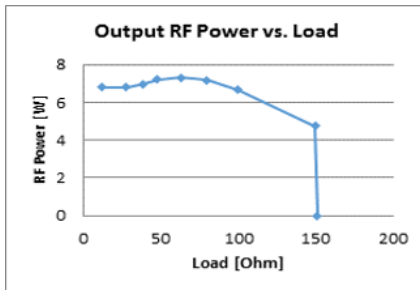

17. תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית

Test	Standard	Class/ Severity Level	Test Result
Emission (IEC 60601-1-2 section 7)			
Conducted emission Freq range 150 kHz – 30 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	N/A
Radiated emission Freq range 30 – 1000 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Harmonic current emission test	IEC 61000-3-2	AC mains	N/A
Voltage changes. Voltage fluctuations and Flicker test	IEC 61000-3-3	AC mains	N/A
Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV contact discharges & 15kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz + 2.7 GHz, 80% AM, 1kHz	Complies
Immunity from Proximity field from wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	List of frequencies, from 9 V/m up to 28 V/m, PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz	Complies
Immunity from power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50Hz & 60Hz	Complies

זכויות יוצרים © 2020 הום סקינוביישנס בע"מ. כל הזכויות שמורות.

חברת הום סקינוביישנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצריה או במפרט הטכני שלהם במטרה לשפר את הביצועים, האמינות או יכולת הייצור. המידע שמספקת הום סקינוביישנס בע"מ ייחשב כמדויק ואמין בעת פרסומו. עם זאת, הום סקינוביישנס בע"מ אינה נושאת באחריות על אופן השימוש בו. המידע אינו מעניק למשתמש, במשתמע או בכל אופן אחר, רישיון במסגרת פטנט או זכויות על פטנט של הום סקינוביישנס בע"מ. אין לשכפל או להעביר שום חלק ממסמך זה בשום אופן או אמצעי, אלקטרוני או מכני, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב של הום סקינוביישנס בע"מ. הנתונים כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. הום סקינוביישנס בע"מ היא הבעלים של כל הפטנטים, הבקשות לרישום פטנטים, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לתוכן מסמך זה. מסירת מסמך זה אינה מעניקה לכם רישיון כלשהו בנוגע לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות אלה, מלבד כאשר הדבר מצוין במפורש בהסכם כתוב כלשהו מטעם הום סקינוביישנס בע"מ. המפרט הטכני כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. Silk'n והלוגו של Silk'n הינם סימנים מסחריים רשומים של הום סקינוביישנס בע"מ, בניין תבור, שער יקנעם, ת"ד 533, יוקנעם 2069206.

